

NEW

GLY-Medium

Glucose-Lactalbumin-Hefe Virustransportmedium

Sammel- und Transportröhrchen mit Transportmedium für Viren und virushaltige Human-Proben

- **Gebrauchsfertiges Virustransportmedium**
- **Aufrechterhaltung der viralen Replikationsfähigkeit**
- **Kein Austrocknen des Probenmaterials**
- **Hemmung des Wachstums von anderen Mikroorganismen, z.B. *E. coli*, *Candida albicans*, *Staphylococcus epidermidis***
- **Für PCR-Methoden geeignet**
- **Lichtgeschützte Lagerung bei -20 °C, 2-8 °C oder 8-25 °C**

Anwendung

1. Probenmaterial mit Abstrichtupfer entnehmen
2. Abstrichtupfer in das Transportmedium eintauchen
3. Tupfer an seiner Sollbruchstelle abbrechen
4. Röhrchen mit dem Schraubverschluss fest verschließen
5. Abgebrochener Abstrichtupfer klemmt sich nach dem Verschließen automatisch in die Deckelkerbe
6. Nach dem Transport lässt sich Abstrichtupfer mit Hilfe des Deckels einfach aus dem Röhrchen entfernen, weshalb das Berühren des Tupfers nicht notwendig ist

Auswertung

Bei einer anschließenden Quantifizierung des Virusmaterials zeigte sich für das Glucose-Lactalbumin-Hefe Virustransportmedium (GLY) kein Unterschied im Vergleich zum Universal Transport Medium (UTM) [Jenny et al., 2010].



Bestellinformation

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
60-2025	GLY-Medium	3 ml/ Röhrchen H: 82,70 mm	100 Stück
95-1020	Abstrichtupfer Nase	flexible Nylon-Flockfaser, einzeln steril verpackt	100 Stück
95-1021	Abstrichtupfer Mund & Rachen	Nylon-Flockfaser, einzeln steril verpackt	100 Stück

Weitere Informationen finden Sie unter
<https://covid19.xebios.de/covid-19-testkits/>

Datum der Fassung: 10/06/2020

Angebot

Ich wünsche mir ein Angebot für die unten genannten Produkte.^{*)}

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt	Menge
60-2025	GLY-Medium	3 ml/ Röhrchen H: 82,70 mm	100 Stk.	
95-1020	Abstrichtupfer Nase	flexible Nylon-Flockfaser, einzeln steril verpackt	100 Stk.	
95-1021	Abstrichtupfer Mund & Rachen	Nylon-Flockfaser, einzeln steril verpackt	100 Stk.	

Ort, Datum

Name

Bestellung

Ich bestelle die unten genannten Produkte.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt	Menge
60-2025	GLY-Medium	3 ml/ Röhrchen H: 82,70 mm	100 Stk.	
95-1020	Abstrichtupfer Nase	flexible Nylon-Flockfaser, einzeln steril verpackt	100 Stk.	
95-1021	Abstrichtupfer Mund & Rachen	Nylon-Flockfaser, einzeln steril verpackt	100 Stk.	

Ort, Datum

Name

Rechnungsadresse

Firma / Abteilung

Ansprechpartner

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Meine Kontaktdaten^{*)} / Lieferadresse

Firma / Abteilung

Ansprechpartner

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

per E-Mail an: covid19@sifin.de
oder per Fax an: +49 30 700 144-30